

Le contrôle de la protection cutanée avec Dermalux® System

Dans le cadre de recommandations relatives à des mesures de préventions, les avantages didactiques du **système Dermalux®** se sont développés pour devenir un élément constituant persuasif de la formation et des contrôles de la protection cutanée. Les possibilités de mise en application sont très étendues et aménageables par chaque instructeur individuellement. Le système de formation convient à tous les responsables des instituts de formation, aux cabinets et aux centres médicaux, ainsi qu'aux firmes du domaine médical et aux cliniques, actives dans le domaine de la dermatologie professionnelle. Il a en outre été démontré que, dans un grand nombre de domaines comme l'industrie pharmaceutique et alimentaire, l'hygiène clinique ou tout le domaine des soins en général, les possibilités de combinaison entre éléments de la formation à la protection cutanée et l'enseignement pour l'hygiène du personnel qu'ouvre le système de formation, ont été perçues comme étant extrêmement profitables. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans nos instructions d'utilisation pour la formation à l'hygiène.



Pour la première fois, il est possible de visualiser le fait que la protection cutanée ne peut agir qu'aux localisations où les crèmes de protection sont appliquées correctement. Rien ne peut être plus persuasif de la nécessité de la protection cutanée que le sentiment de vulnérabilité que vous pouvez faire naître chez la personne-test qui est pour la première fois en mesure de voir les parties "non protégées" de ses mains. C'est à cet instant que le processus d'apprentissage entre en action. Contrôlez le résultat immédiatement ou après quelques semaines ou quelques mois. Informez-vous également des études pertinentes à ce sujet sur Internet à l'adresse www.dermalux.de.

Déroulement du test de fluorescence

La personne-test a besoin d'environ 1-2 ml de la **lotion de test Dermalux®**. Commencez par en prendre un peu moins et rajoutez-en un peu si la quantité n'est pas suffisante pour la personne-test. Pensez à appliquer correctement la lotion de test **Dermalux® Testlotion** sur le dos des mains. Demandez alors à la personne-test de s'appliquer le produit sur les mains comme elle le fait normalement avec sa crème de protection habituelle. La substance de test est à présent invisible à l'œil nu.

Afin de procéder à l'examen des mains dans la **Dermalux® Checkbox**, la personne se place devant l'appareil et introduit les mains dans la large ouverture inférieure de celui-ci. En déplaçant les mains, veiller à ce que l'extrémité des doigts reste à la hauteur des marques blanches. La personne-test regarde ensuite par la fente de visualisation supérieure repérée (étiquette "Test de fluorescence") et peut à présent s'examiner complètement les mains à la lumière UV. Les autres personnes-test participant également à la séance dans le cadre de formation de groupe ont un angle de vue suffisant vers l'intérieur de l'appareil pour pouvoir par exemple prendre part à la discussion sur le résultat du test.

Les parties de la peau des mains ayant été enduites de la lotion de test apparaissent en blanc lumineux à l'intérieur de la **Dermalux® Checkbox**. Les parties non traitées apparaissent en foncé et se détachent avec un grand contraste. Vous serez alors surpris de constater à quel point les personnes de test sont persuadées d'avoir appliqué le produit en tous points. En réalité, des emplacements comme les espaces interdigitaux, la base des ongles, la partie externe des pouces ou les articulations des doigts sont par exemple souvent négligées - et une protection cutanée insuffisante n'a pas plus de valeur que l'absence totale de protection.

En utilisant le système **Dermalux® System**, vous aurez très tôt le sentiment que vos séances sont plus vivantes et plus didactiques si vous prêtez vraiment attention à ce qui se dit, si vous observez exactement ce qui se passe et si vous favorisez la communication entre les personnes de test pendant vos cours. Et un peu de plaisanterie peut vous faire parvenir à votre but.

Encore quelques suggestions d'utilisation importantes pour la formation

- Mettre en marche la Dermalux® Checkbox environ 15 minutes avant le début de la formation afin d'atteindre la température de fonctionnement optimale et la performance maximale des lampes.
- Pour le cours de formation, choisir un emplacement approprié afin que l'effet fluorescent blanc et attrayant ne soit pas influencé par la lumière pénétrant dans l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface le plus sombre possible. Pour cette raison, le coffret de transport et de présentation Dermalux® livré en tant qu'accessoire est équipé d'une plaque de fond permettant une présentation optimale de l'appareil. Cette plaque peut être retirée du coffret et servir de support à l'appareil, sur la table.
- Lors de la mise en service et de l'utilisation de lampes UV, respecter les recommandations d'utilisation ainsi que les directives de la protection du travail. Une fois l'appareil sous tension, ne l'utiliser qu'en conformité avec les recommandations du fabricant. Ne pas regarder directement la lumière UV. Respecter les informations techniques relatives au fonctionnement de l'appareil.
- En cas de prise de certains médicaments, par ex. certains antibiotiques, ou en cas d'hypersensibilité connue, les personnes-test doivent être averties qu'elles peuvent éventuellement voir la sensibilité aux UV de leur peau augmenter. Le conseil auprès d'un médecin est également recommandé pour les personnes ayant été opérées de la cataracte. Dans certains cas, le port de lunettes anti-UV peut être nécessaire.
- A la suite du test, nous vous recommandons de vous laver les mains.

Adresse de référence et informations:

KBD GmbH
Kaiserstrasse 35
D- 69469 Weinheim
Tél: +49 (0) 6201/59 00 65
Fax: +49 (0) 6201/59 00 66
E-mail: [info @dermalux.de](mailto:info@dermalux.de)
www.dermalux.de